

## 9. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ιατρικής κατάστασης ενός ασθενούς ή τον κίνδυνο θανάτου, ΔΙΑΚΟΨΤΕ αρμέσως τη χρήση του ενδύματός σας και επικοινωνήστε:

- Ο κατασκευαστής Medigarmments Ltd.
- Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος
- Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαστωμάτων, όπως ζημιά στο ύφασμα και τις φαρές, ή αν έχετε οποιεδήποτε ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή του ενδύματός σας, παρακαλείστε να επικοινωνήστε αρμέσως με τον θεράποντα ιστρό σας.

## 10. Λάτεξ

Αυτό το ένδυμα δεν περιέχει λατέξ.

## 11. Σύνθεση υφάσματος

Η σύνθεση του υφάσματος αναγράφεται στη μεταξωτή ετικέτα στο εσωτερικό του ενδύματός σας.

## 13. Οδηγίες πλυσίματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πλυσίματος για να διατηρήσετε την ελαστικότητα και τη μακροζωία του ενδύματός σας, αντίγραφο των οποίων είναι τυπωμένο στη μεταξωτή ετικέτα που είναι ραμμένη στο Jobskin® Premium ένδυμά σας.

Πλύνετε το ρούχο σας ξεχωριστά την πρώτη φορά, για να αποφύγετε τυχός ξέβαμψα των χρωμάτων. Η Medigarmments Ltd συνιστά να γυρίζετε το ένδυμά σας ανάποδα και να κλείνετε τυχόν φερμουάρ πριν από το πλύσιμο, καθώς αυτό συμβάλλει στην προστασία και την παράταση της διάρκειας ζωής του ενδύματός σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Η χρήση μιας σακούλας πλυντηρίου μέσα στο πλυντήριο βοηθά στην προστασία του νέου σας ρούχου Jobskin® Premium.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μετά το πλύσιμο στο χέρι, τυλίξτε σφιχτά το ένδυμά σας μέσα σε μια χοντρή πετσέτα για να απομακρύνετε την περισσεία υγρασία και στη συνέχεια, στεγνώστε το σε μια δεύτερη πετσέτα.

**Βασικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν:**

- Πλύσιμο στο χέρι
  - Πλυντήριο 30°C
  - Μην λευκάνετε
  - Μην σιδερώνετε
  - Κατά το πλύσιμο στο χέρι, ζεπτώνετε καλά και μην στύβετε
- Συμβουλεύουμε να πλένετε καθημερινά τα ενδύματα Jobskin® Premium.



## 14. Πρόσθετες πληροφορίες

Ακολουθήστε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας και φρέστε το σύμφραν με τις οδηγίες για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια για να φρέστεται και να βγαλείται το ένδυμα και ο θεράπων ιατρός σας θα πρέπει να ενημερωθεί γ' αυτό.

Αν και τα ενδύματα Medigarmments Ltd είναι ανθεκτικά στις περισσότερες κρέμες και έλαια, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα, καθώς ορισμένες κρέμες μπορεί να βλάψουν το ύφασμα, να μειώσουν την ελαστικότητα και την αποτελεσματικότητα του ενδύματος πίεσης.

- Αποφύγετε τη χρήση κρεμών που περιέχουν κερί, παραφίνη ή πετρέλαιο
- Χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα ή κρέμα με βάση το νερό ή τη σιλικόνη

Ελέγχετε πάντα το ένδυμα και το δέρμα καθημερινά πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε υπερευαίσθησια ή αλλεργική αντίδραση στα υλικά του ενδύματος. Παρακαλείστε να απευθυνθείτε επειγόντως στον θεράποντα ιατρό σας.

Όταν εφαρμόζετε ξανά το ένδυμά σας μετά το μάνικο, την εφαρμογή της κρέμας και το μασάζ, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι στεγνό και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κρέμας στο δέρμα. Εάν φοράτε το ρούχο σας ενώ κολυμπάτε, πρέπει να ξεπλύνετε το χλωρίο σας ή το θαλασσινό αλάτι αμέσως μετά για να διατηρήσετε και να προστατεύετε το ύφασμα.

Οι επισκευές και οι πρόσαρμογές του ενδύματός σας πρέπει να πραγματοποιούνται από την Medigarmments Ltd ή από εξειδικευμένο επαγγελματικό υγείας. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το ένδυμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας το συντομότερο δυνατό.

**Σημαντικό:** Παρακαλούμε μην αφαιρείτε την ετικέτα μεταξιού μέσα από το ρούχο σας, καθώς η εγγύηση θα ακυρωθεί.

## 15. Ορισμός των συμβόλων



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση



Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή



Ημερομηνία κατασκευής



EC REP, Ευρωπαϊκός Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για την εκπροσώπηση της Medigarmments Ltd στην ΕΕ και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες



Ιατροτεχνολογικό Προϊόντος



Σήμανση CE



Βρετανική σήμανση αξιολόγησης πιστότητας



Χρήση μόνο για έναν ασθενή, μην χοιράζεστε αυτό το ένδυμα



Αριθμός ασθενούς



Διατηρήστε στεγνό



Προστατέψτε από το ηλιακό φως



Απόρριψη στα οικιακά απορρίμματα

## Medigarmments Ltd®

DESIGNED AROUND YOU

## Jobskin® Premium

### Greek / Ελληνικά Οδηγίες χρήσης



Medigarmments Ltd  
Unit 13a Harrington Mill,  
Leopold Street,  
Long Eaton,  
Nottingham  
NG10 4QG

Adrena Ltd.  
Tower Business Centre,  
2nd Floor, Tower Street,  
Swatar, BKR 4013 Malta

## 16. Πληροφορίες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής

Αποθηκεύστε το νέο σας ένδυμα Jobskin® Premium σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Τα ρούχα κατά παραγγελία Jobskin® Premium είναι σχεδιασμένα για άμεση χρήση, καθώς οι σωματικές διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Με το σωστό χειρισμό και τη σωστή φροντίδα, το ένδυμα σας μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες επαναλαμβάνομένη χρήσης (περιόδος χρήσης), μετά την ιατρό της οποίας θα πρέπει να συμβουλεύετε πάντα τον ιατρό σας προκειμένου να μετρηθεί για ένα νέο ένδυμα.

**Επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας εάν συμβούν σα ακόλουθα:**

- Παίρνετε ή χάνετε σημαντική ποσότητα βάρους
- Το ρούχο σας έχει υποστεί φθορά και πρέπει να αντικατασταθεί

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι παραπόνων προϋποθέσεις, μπορεί να απαιτηθεί νέο ένδυμα πριν παρέλθει η περιόδος των 6 μήνων. Παρακαλείστε να μη φοράτε ενδύματα που είναι πολύ στεγνά ή πολύ χαλαρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στη θεραπευτική σας επιπτώση.

Το νέο σας κατά παραγγελία Jobskin® Premium ένδυμα προσφέρεται μόνο για δική σας χρήση, παρακαλούμε μην δώσετε αυτό το ένδυμα σε τρίτους.

## 17. Απόρριψη του ενδύματός σας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την απόρριψη των ενδυμάτων σας. Παρακαλείστε να απορρίψετε τα χρησιμοποιημένα ενδύματά σας στα οικιακά σας απορρίμματα ή στο σημείο ανακύλωσης ενδυμάτων.



## Περιεχόμενα

Παρακαλείστε να φυλάξετε αυτό το φυλλάδιο σε ασφαλές μέρος, καθώς μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε ξανά σε αυτό. Εάν έχετε οποιεδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί στο παρόν φύλλο οδηγιών ή δεν είστε σίγουροι για κάτια, παρακαλείστε να ρωτήσετε τον θεράποντα σας για καθοδήγηση.

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα εξής:

1. Προβλεπόμενη χρήση
2. Πότε να φοράτε το ένδυμα Jobskin® Premium
3. Φόρεση το ένδυμα Jobskin® Premium
4. Τύποι διαθέσιμων ενδυμάτων Jobskin® Premium
5. Ενδείξεις
6. Αντενδίξεις
7. Υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις
8. Πρεσβεδοποίησης και προφυλάξεις
9. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος
10. Λατέξ
11. Σύνθεση υφάσματος
12. Medigarmments Ltd στοιχεία διεύθυνσης
13. Οδηγίες πλυσίματος
14. Πρόσθετες πληροφορίες
15. Ορισμός των συμβόλων
16. Πληροφορίες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής
17. Απόρριψη του ενδύματός σας

## 1. Προβλεπόμενη χρήση

Το ένδυμα πίεσης Medigarmets Ltd Jobskin® Premium είναι ένα κατά παραγγελία, στένο αλλά ελαστικό ρούχο κατασκευασμένο από ύφασμα που περιέχει Lycra®. Το ένδυμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ατομικές σας διαστάσεις για να παρέχει μια ομαλή, σταθερή και συμπαγή πίεση πάνω στις ουλώδεις περιοχές του σώματός σας.

Σκοπός του ενδύματος πίεσης Jobskin® Premium είναι η διαχείριση των προβληματικών ουλών. Το ένδυμα παρέχει συμπίεση σε περιοχές με αυξημένες υπερτροφικές ουλές για να εδραιώνει, να μαλακώσει και να μειώσει τις ουλές και το ερύθριο της ουλής και να βοηθήσει τη φυσική διαδικασία ωρίμανσης της ουλής.

Το νέο σας ένδυμα Medigarmets Ltd έχει κατασκευαστεί στο Long Eaton του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έχει μετρηθεί επαγγελματικά και συνταγογραφηθεί από πιστοποιημένο κλινικό ιατρό.

## 2. Πότε να φοράτε το ένδυμα Jobskin® Premium

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό το ένδυμα Jobskin® Premium έχει μετρηθεί και σχεδιαστεί από ειδικούς για τον χρήστη και πρέπει να φοριέται μόνο από τον χρήστη. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κανέναν άλλον.

Είναι σημαντικό να μετρηθείτε και να εξεταστείτε από κατάλληλα καταρτισμένο κλινικό ιατρό, με εμπειρία στη μέτρηση και τοποθέτηση ενδυμάτων συμπίεσης.

Είναι ευθύνη του θεράποντος ιατρού να επανεξετάζει το ένδυμά σας και να σας συμβουλεύει πότε απαιτείται νέο. Συνιστάται ο έλεγχος του ενδύματός σας από τον κλινικό σας ιατρό πάντα όχι πάντα κάθε 3 μήνες για τα παιδιά και 4-6 μήνες για τους ενήλικες για να δισφαλιστεί η εφαρμογή και να επανεξεταστεί η πρόσδοση.

Τα φθαρμένα, χαλαρά ή κατεστραμμένα ενδύματα θα πρέπει να αντικαθίστανται, επομένως, είναι σημαντικό να παρευρίσκετε στα τακτικά ραντεύου πανεπεξετασης.


Ξεκινάτε τη θεραπεία συμπίεσης μόλις το τραύμα κλείσει και η πλήρης πίεση μπορεί να γίνει ανεκτή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο χρόνος κατά τον οποίο η ουλή είναι ενεργή.

Πρόγραμμα ένδυσης:

- Είναι σημαντικό τα ενδύματα πίεσης Jobskin® Premium να φοριούνται σταθερά για 12-24 μήνες ή μέχρι την ωρίμανση της ουλής για 23 ώρες την ημέρα. Αυτό δισφαλίζει την πρότεινη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος στη διαχείριση των ουλών, τόσο από αισθητική όσο και από λειτουργική άποψη
- Τα ενδύματα τυπικά αφαιρούνται 3 φορές την ημέρα για το μπάνιο και την περιορίση της ουλής και οι μάστις μπορούν να αφαιρούνται κατά τη διάρκεια των γεμάτων
- Μόλις τοποθετήσετε το ένδυμα συμπίεσης στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει ομαλά στο δέρμα σας και ότι είναι εφαρμοστό αλλά όχι επώδυνο
- Συνιστάται η επανεξέταση της εφαρμογής του ενδύματος σε τακτική βάση από τον κλινικό για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της θεραπείας:

- Η σοβαρότητα των ουλών
- Γενετική και ορμόνες - οι θεραπευτικές αντιδράσεις μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο
- Λοιμώξη ή καθυστερημένη επούλωση
- Το σημείο της ουλής και η προσβεβλημένη επιφάνεια
- Συμμόρφωση στο θεραπευτικό καθεστώς

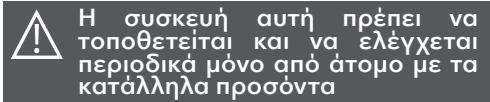

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται και να ελέγχεται περιοδικά μόνο από άτομο με τα κατάλληλα προσόντα

## 3. Φόρεση το ένδυμα Jobskin® Premium

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ανατρέξτε στο πρόσθετο φυλλάδιο οδηγιών εάν το ένδυμά σας περιέχει ένθετα Silon-TEX® II.

Ακολουθήστε τις συμβουλές του θεράποντος ιατρού σας πριν φορέσετε αυτό το ένδυμα Jobskin® Premium.

**Για όλα τα ενδύματα Jobskin® Premium, ακολουθήστε τις παρακάτω τυποποιημένες οδηγίες προτού διάβαστε τις ειδικές οδηγίες ένδυσης για τον τύπο του ενδύματός σας:**

Το να φοράτε και να βγάζετε τα ενδύματα συμπίεσης μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά ελαστικοποιούνται μετά από λίγη χρήση. Υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες που μπορούν να σας βοηθήσουν με τα ενδύματα ως εξής:

- Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο οδηγιών, δινούντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα 8. Προειδοποίησης και προφύλαξης, και, 14. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις κρέμες και τα έλαια, πριν φορέσετε το ένδυμα Jobskin® Premium
- Χρησιμοποιήστε μια ενυδατική κρέμα με βάση τη σιλικόνη ή το νερό και βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά στο δέρμα πριν φορέσετε το ένδυμά σας
- Συνιστάται το ένδυμα να φοριέται από το πρωί και να φοριέται για 23 ώρες, αφαιρώντας το μόνο για λόγους κολύμβησης

- Ο ιατρός σας μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα βιοθήματα που θα σας βοηθήσουν να φορέσετε και να βγάλετε το ένδυμά σας
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά, χωρίς αιχμηρά νύχια που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ύφασμα, αποφύγετε να βάζετε τα νύχια σας στο ύφασμα όταν τραβάτε το ένδυμα

- Μην τεντώνετε υπερβολικά το υλικό
- Ανοιξτε όλα τα φερμουάρ/κουμπώματα
- Αφαιρέστε προσωρινά τα κοσμήματα από τα χέρια, τους καρπούς και τους αστραγάλους, κατά περίπτωση, ενώ φοράτε και βγάζετε το πούρο σας. Κοσμήματα, όπως δαχτυλίδια με πέτρες, μπορεί να πιαστούν στο ένδυμά σας

### Ενδύματα κάτω άκρων

Ελέγχετε την επικέτα του ενδύματος Jobskin® Premium για αριστερά ή δεξιά, ξεκινώντας με το ένδυμα ανάποδα, βάλτε το τμήμα του ποδού προς τα μέσα μέχρι τη φτέρνα και κρατήστε το με τα δύο χέρια, με τη ραφή στραμμένη προς τα κάτω. Τραβήξτε το πάνω από το πόδι σας πέρα από τον αστραγάλο, θα πρέπει τώρα να είναι από τη δεξιά πλευρά προς τα έξω. Προσαρμόστε το ένδυμα έτσι ώστε η φτέρνα να είναι στη θέση της.

### Ενδύματα ψηλή στη μέση

Προσαρμόστε το ρούχο σας έτσι ώστε να είναι άνετο στη μέση σας. Αυτό θα το εμποδίσει να γιλιστήσει προς τα κάτω.

Βάλτε τα χέρια σας με την παλάμη προς τα έξω, μέσα στην πλάτη και στηκώστε το μακριά από το δέρμα σας. Αφήστε το να πέσει προς τα πάνω για να εφαρμόσει άνετα πάνω στους γλουτούς.

### Μανίκια βραχιόνων

Περάστε το χέρι σας μέσα από ολόκληρο το μανίκι, κρατώντας τη ραφή σε ευθεία γραμμή με το μικρό σας δάχτυλο, και ανεβάστε το μανίκι στο βραχίονα σας. Μπορεί να είναι χρήσιμο να ακουμπήσετε το χέρι σας σε έναν τοίχο. Εάν υπάρχει γάντι, η ραφή θα πρέπει να περνάει από την παλάμη στο χέρι

σας και στη συνέχεια να καμπυλώνει πάνω από τον αγκώνα σας στο μπράτσο σας.

### Γάντια

Προσαρμόστε τα δάχτυλα τραβώντας προσεκτικά τις ραφές μέχρι το γάντι να εφαρμόζει άνετα στους χώρους μεταξύ των δαχτύλων. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα έχει εξομαλυνθεί χειρουργικών ουλών.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέσω διεθνών ερευνών δείχνουν ότι η έγκαιρη εφαρμογή ενδυμάτων θεραπείας πίεσης με το σωστό καθεστώς εφαρμογής συμβάλλει επιτυχώς στον έλεγχο της ανάπτυξης μη φυσιολογικού ουλώδους ιστού σε προβληματικές ουλές.

Επιτυγχάνουν την παραγγελία μιας πιο λείας, μαλακής και εύκαμπτης ουλής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης και τη μείωση των πιθανών συσπάσεων.

Η συνεχής πίεση που παρέχεται από τα ενδύματα πίεσης μπορεί να αποσφέρει υψηλό βαθμό μη χειρουργικού ελέγχου του σχηματισμού υπερτροφικών ουλών και των συστολών των ουλών για την επίτευξη μιας πιο μαλακής, επίπεδης και χλωμής ουλής.

## 5. Ενδείξεις

Η αντιμετώπιση και η προφυλακτική θεραπεία προβληματικών ουλών, συμπεριλαμβανομένων των υπερτροφικών και κελοειδών ουλών που προκαλούνται από βλάβες στο δέρμα μετά από εγκαύματα, πραύματα ή μετεγχειρητικές επιπλοκές χειρουργικών ουλών.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέσω διεθνών ερευνών δείχνουν ότι η έγκαιρη εφαρμογή ενδυμάτων θεραπείας πίεσης με το σωστό καθεστώς εφαρμογής συμβάλλει επιτυχώς στον έλεγχο της ανάπτυξης μη φυσιολογικού ουλώδους ιστού σε προβληματικές ουλές.

Επιτυγχάνουν την παραγγελία μιας πιο λείας, μαλακής και εύκαμπτης ουλής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης και τη μείωση των πιθανών συσπάσεων.

Η συνεχής πίεση που παρέχεται από τα ενδύματα πίεσης μπορεί να αποσφέρει υψηλό βαθμό μη χειρουργικού ελέγχου του σχηματισμού υπερτροφικών ουλών και των συστολών των ουλών για την επίτευξη μιας πιο μαλακής, επίπεδης και χλωμής ουλής.

## 6. Αντενδείξεις

Με ένα κατά παραγγελία ένδυμα που ελέγχεται τακτικά από επαγγελματία υγείας, οι αντενδείξεις είναι πολύ σπάνιες.

- Μη αντισταθμισμένη οργανική ανεπάρκεια (π.χ. καρδιακή, ηπατική ή νεφρική)
- Ανεπεξέργαση σε εντούτοις προβλήματα
- Σοβαρή αρτηριακή νόσος (ABI 0,49 ή λιγότερο)

## 7. Υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις

Ο ιατρός σας θα πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις που πορεύεται σε κάθε θραβιά στην πλευρά του καθενός. Οι τύποι των ενδυμάτων Jobskin® Premium. Εάν δεν έχετε ειδοποιήσει τον κλινικό σας για οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.

## 8. Προειδοποιήσεις και προφύλαξη

Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες όταν φοράτε αυτό το ένδυμα με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας. Εάν η ιατρή σας καταστάση επιδεινώθηκε ενώ φοράτε αυτό το ένδυμα, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε αμέσως το ιατρό ή τον κλινικό ιατρό σας.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, καταστάσεις ή τραματισμούς που προκύπτουν από τον χειρισμό ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του ενδύματος. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις από τον χρήστη. Το ένδυμα σας πρέπει να συντηρείται τακτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Τα ενδύματα Jobskin® Premium δεν είναι επιβραδυντικά φλόγας, αποφύγετε τις γυμνές φλόγες όταν τα φοράτε.

Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- Αλλεργική αντιδράση
  - Αποχρωματισμός ή αλλαγή της θερμοκρασίας του σώματος που δείχνει προβλήματα κυκλοφορίας ή αγγείων
  - Διαρκής ερυθρότητα ή δερματικές εκδορές
  - Αυξημένη θερμοκρασία
- Εάν έχετε ανοιχτές πληγές στην περιοχή που πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία, αυτές πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλο επίδεσμο ή επιθέμα, πριν από την εφαρμογή του ενδύματος συμπίεσης.