

9. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ιατρικής κατάστασης ενός ασθενούς ή τον κίνδυνο θανάτου, ΔΙΑΚΟΨΤΕ αμέσως τη χρήση του ενδύματός σας και επικοινωνήστε:

- Ο κατασκευαστής Medigarmments Ltd.
- Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος
- Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαττωμάτων, όπως ζημία στο ύφασμα και τις ραφές, ή αν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή του ενδύματός σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε αμέσως με τον θεράποντα ιατρό σας.

10. Λάτεξ

Αυτό το ένδυμα δεν περιέχει λατέξ.

11. Σύνθεση υφάσματος

Η σύνθεση του υφάσματος αναγράφεται στη μεταξωτή ετικέτα στο εσωτερικό του ενδύματός σας.

Medigarmments Ltd
DESIGNED AROUND YOU

Medigarmments Ltd
Unit 13a Harrington Mill, Leopold Street,
Long Eaton, Nottingham NG10 4QG

+44 115 973 4300
customerservice@jobskin.co.uk

www.jobskin.co.uk

Ακολουθήστε μας στο:



13. Οδηγίες πλυσίματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πλυσίματος για να διατηρήσετε την ελαστικότητα και τη μακροζωία του ενδύματός σας, αντίγραφο των οποίων είναι τυπωμένο στη μεταξωτή ετικέτα που είναι ραμμένη στο Jobskin® Premium ένδυμά σας.

Πλύνετε το ρούχο σας ξεχωριστά την πρώτη φορά, για να αποφύγετε τυχόν ξέβρασμα των χρωμάτων. Η Medigarmments Ltd συνιστά να γυρίζετε το ένδυμά σας ανάποδα και να κλείνετε τυχόν φερμουάρ πριν από το πλύσιμο, καθώς αυτό συμβάλλει στην προστασία και την παράταση της διάρκειας ζωής του ενδύματός σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η χρήση μιας σακούλας πλυντηρίου μέσα στο πλυντήριο βοηθά στην προστασία του νέου σας ρούχου Jobskin® Premium.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μετά το πλύσιμο στο χέρι, τυλίξτε σφιχτά το ένδυμά σας μέσα σε μια χοντρή πετσέτα για να απομακρύνετε την περίσσεια υγρασία και στη συνέχεια, στεγνώστε το σε μια δεύτερη στεγνή πετσέτα.

Βασικά σημεία που πρέπει να σημειώσετε:

- Πλύνετε τα σκουρόχρωμα ξεχωριστά
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ένα μη βιολογικό ήπιο απορρυπαντικό
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφασμάτων
- Μην στεγνώνετε στο άμεσο ηλιακό φως
- Μην στεγνώνετε σε καλοριφέρ
- Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
- Κατά το πλύσιμο στο χέρι, ξεπλύνετε καλά και μην στύβετε

Συμβουλεύουμε να πλένετε καθημερινά τα ενδύματα Jobskin® Premium.



14. Πρόσθετες πληροφορίες

Ακολουθήστε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας και φορέστε το σύμφωνα με τις οδηγίες για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια για να φορέσετε και να βγάλετε το ένδυμα και ο θεράπων ιατρός σας θα πρέπει να ενημερωθεί γι' αυτό.

Αν και τα ενδύματα Medigarmments Ltd είναι ανθεκτικά στις περισσότερες κρέμες και έλαια, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα, καθώς ορισμένες κρέμες μπορεί να βλάψουν το ύφασμα, να μειώσουν την ελαστικότητα και την αποτελεσματικότητα του ενδύματος πείσης.

- Αποφύγετε τη χρήση κρεμών που περιέχουν κερι, παραφίνη ή πετρέλαιο
- Χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα ή κρέμα με βάση το νερό ή τη σιλκόνη

Ελέγχετε πάντα το ένδυμα και το δέρμα καθημερινά πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε υπερευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση στα υλικά του ενδύματος. Παρακαλείστε να απευθυνθείτε επειγόντως στον θεράποντα ιατρό σας.

Όταν εφαρμόζετε ξανά το ένδυμά σας μετά το μπάνιο, την εφαρμογή της κρέμας και το μασάζ, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι στεγνό και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κρέμας στο δέρμα.

Εάν φοράτε το ρούχο σας ενώ κολυμπάτε, πρέπει να ξεπλύνετε το χλώριο ή το θαλασσινό αλάτι αμέσως μετά για να διατηρήσετε και να προστατεύσετε το ύφασμα.

Οι επισκευές και οι προσαρμογές του ενδύματός σας πρέπει να πραγματοποιούνται από την Medigarmments Ltd ή από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το ένδυμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας το συντομότερο δυνατό.

Σημαντικό: Παρακαλούμε μην αφαιρείτε την ετικέτα μεταξωτή μέσα από το ρούχο σας, καθώς η εγγύηση θα ακυρωθεί.

15. Ορισμός των συμβόλων

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
- Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή
- Ημερομηνία κατασκευής
- EC REP, Ευρωπαϊκός Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για την εκπροσώπηση της Medigarmments Ltd στην ΕΕ και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
- Ιατροτεχνολογικό Προϊόντος
- Σήμανση CE
- Βρετανική σήμανση αξιολόγησης πιστότητας
- Χρήση μόνο για έναν ασθενή, μην μοιράζετε αυτό το ένδυμα
- Αριθμός ασθενούς
- Διατηρήστε στεγνό
- Προστατέψτε από το ηλιακό φως
- Απόρριψη στα οικιακά απορρίμματα

16. Πληροφορίες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής

Αποθηκεύστε το νέο σας ένδυμα Jobskin® Premium σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Τα ρούχα κατά παραγγελία Jobskin® Premium είναι σχεδιασμένα για άμεση χρήση, καθώς οι σωματικές διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Με το σωστό χειρισμό και τη σωστή φροντίδα, το ένδυμά σας μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες επαναλαμβανόμενης χρήσης (περίοδος χρήσης), μετά το πέρας της οποίας θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προκειμένου να μετρηθεί για ένα νέο ένδυμα.

Επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας εάν συμβολίσει τα ακόλουθα:

- Παίρνετε ή χάνετε σημαντική ποσότητα βάρους
- Το ρούχο σας έχει υποστεί φθορά και πρέπει να αντικατασταθεί

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να απαιτηθεί νέο ένδυμα πριν παρέλθει η περίοδος των 6 μηνών. Παρακαλείστε να μη φοράτε ενδύματα που είναι πολύ στενά ή πολύ χαλαρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στη θεραπευτική σας επιτυχία.

Το νέο σας κατά παραγγελία Jobskin® Premium ένδυμα προορίζεται μόνο για δική σας χρήση, παρακαλούμε μην δώσετε αυτό το ένδυμα σε τρίτους.

17. Απόρριψη του ενδύματός σας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την απόρριψη των ενδυμάτων σας. Παρακαλείστε να απορρίψετε τα χρησιμοποιημένα ενδύματά σας στα οικιακά σας απορρίμματα ή στο σημείο ανακύκλωσης ενδυμάτων.



Medigarmments Ltd
DESIGNED AROUND YOU

Jobskin® Premium
Greek / Ελληνικά
Οδηγίες χρήσης



Medigarmments Ltd
Unit 13a Harrington Mill,
Leopold Street,
Long Eaton,
Nottingham
NG10 4QG



Ardvena Ltd,
Tower Business Centre,
2nd Floor, Tower Street,
Swatara, BKR 4013 Malta

Περιεχόμενα

Παρακαλείστε να φυλάξετε αυτό το φυλλάδιο σε ασφαές μέρος, καθώς μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε ξανά σε αυτό. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί στο παρόν φύλλο οδηγιών ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, παρακαλείστε να ρωτήσετε τον θεράποντα ιατρό σας για καθοδήγηση.

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα εξής:

1. Προβλεπόμενη χρήση
2. Πότε να φοράτε το ένδυμα Jobskin® Premium
3. Φόρεση το ένδυμα Jobskin® Premium
4. Τύποι διαθέσιμων ενδυμάτων Jobskin® Premium
5. Ενδείξεις
6. Αντενδείξεις
7. Υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις
8. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
9. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος
10. Λατέξ
11. Σύνθεση υφάσματος
12. Medigarmments Ltd στοιχεία διεύθυνσης
13. Οδηγίες πλυσίματος
14. Πρόσθετες πληροφορίες
15. Ορισμός των συμβόλων
16. Πληροφορίες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής
17. Απόρριψη του ενδύματός σας

1. Προβλεπόμενη χρήση

Το ένδυμα πίεσης Medigarments Ltd Jobskin® Premium είναι ένα κατά παραγγελία, στενό αλλά ελαστικό ρούχο κατασκευασμένο από ύφασμα που περιέχει Lycra®. Το ένδυμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ατομικές σας διαστάσεις για να παρέχει μια ομαλή, σταθερή και συμπαγή πίεση πάνω στις ουλώδεις περιοχές του σώματός σας.

Σκοπός του ενδύματος πίεσης Jobskin® Premium είναι η διαχείριση των προβληματικών ουλών. Το ένδυμα παρέχει συμπίεση σε περιοχές με αυξημένες υπερτροφικές ουλές για να εξομαλύνει, να μαλακώσει και να μειώσει τις ουλές και το ερύθημα της ουλής και να βοηθήσει τη φυσική διαδικασία ωρίμανσης της ουλής.

Το νέο σας ένδυμα Medigarments Ltd έχει κατασκευαστεί στο Long Eaton του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έχει μετρηθεί επαγγελματικά και συνταγογραφηθεί από πιστοποιημένο κλινικό ιατρό.

2. Πότε να φοράτε το ένδυμα Jobskin® Premium

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό το ένδυμα Jobskin® Premium έχει μετρηθεί και σχεδιαστεί από ειδικούς για τον χρήστη και πρέπει να φοριέται μόνο από τον χρήστη. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κανέναν άλλον.

Είναι σημαντικό να μετρηθείτε και να εξεταστείτε από κατάλληλα καταρτισμένο κλινικό ιατρό με εμπειρία στη μέτρηση και τοποθέτηση ενδυμάτων συμπίεσης.

Είναι ευθύν του θεράποντος ιατρού να επανεξετάζει το ένδυμά σας και να σας συμβουλεύει πότε απαιτείται νέο. Συνιστάται ο έλεγχος του ενδύματός σας από τον κλινικό σας ιατρό τουλάχιστον κάθε 3 μήνες για τα παιδιά και 4-6 μήνες για τους ενήλικες για να διασφαλιστεί η εφαρμογή και να επανεξεταστεί η πρόοδος.

Τα φθαρμένα, χαλαρά ή κατεστραμμένα ενδύματα θα πρέπει να αντικαθίστανται, επομένως, είναι σημαντικό να παρευρίσκεστε στα τακτικά ραντεβού επανεξέτασης.

Ξεκινάτε τη θεραπεία συμπίεσης μόλις το τραύμα κλείσει και η πλήρης πίεση μπορεί να γίνει ανεκτή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο χρόνος κατά τον οποίο η ουλή είναι ενεργή.

Πρόγραμμα ένδυσης:

- Είναι σημαντικό τα ενδύματα πίεσης Jobskin® Premium να φοριούνται σταθερά για 12-24 μήνες ή μέχρι την ωρίμανση της ουλής για 23 ώρες την ημέρα. Αυτό διασφαλίζει την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος στη διαχείριση των ουλών, τόσο από αισθητική όσο και από λειτουργική άποψη
- Τα ενδύματα τυπικά αφαιρούνται 3 φορές την ημέρα για το μπάνιο και την περιποίηση της ουλής και οι μάσκες μπορούν να αφαιρούνται κατά τη διάρκεια των γευμάτων
- Μόλις τοποθετήσετε το ένδυμα συμπίεσης στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει ομαλά στο δέρμα σας και ότι είναι εφαρμοστό αλλά όχι επώδυνο
- Συνιστάται η επανεξέταση της εφαρμογής του ενδύματος σε τακτική βάση από τον κλινικό για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της θεραπείας:

- Η σοβαρότητα των ουλών
- Γενετική και ορμόνες - οι θεραπευτικές αντιδράσεις μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο
- Λοίμωξη ή καθυστερημένη επώλυση
- Το σημείο της ουλής και η προσβεβλημένη επιφάνεια
- Συμμόρφωση στο θεραπευτικό καθεστώς



Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται και να ελέγχεται περιοδικά μόνο από άτομο με τα κατάλληλα προσόντα

3. Φόρεσε το ένδυμα Jobskin® Premium

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στο πρόσθετο φυλλάδιο οδηγιών εάν το ένδυμά σας περιέχει ένθετα Silon-TEX® II. Ακολουθήστε τις συμβουλές του θεράποντος ιατρού σας πριν φορέσετε αυτό το ένδυμα Jobskin® Premium.

Για όλα τα ενδύματα Jobskin® Premium, ακολουθήστε τις παρακάτω τυποποιημένες οδηγίες προτού διαβάσετε τις ειδικές οδηγίες ένδυσης για τον τύπο του ενδύματός σας:

Το να φοράτε και να βγάζετε τα ενδύματα συμπίεσης μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά ελαστικοποιούνται μετά από λίγη χρήση. Υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες που μπορούν να σας βοηθήσουν με τα ενδύματα ως εξής:

- Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο οδηγιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα **8. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις**, και, **14. Πρόσθετες πληροφορίες** σχετικά με τις κρέμες και τα έλαια, πριν φορέσετε το ένδυμα Jobskin® Premium
- Χρησιμοποιήστε μια ενυδατική κρέμα με βάση τη σιλικόνη ή το νερό και βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά στο δέρμα πριν φορέσετε το ένδυμά σας
- Συνιστάται το ένδυμα να φοριέται από το πρωί και να φοριέται για 23 ώρες, αφαιρώντας το μόνο για λόγους κολύμβησης
- Ο ιατρός σας μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα βοηθήματα που θα σας βοηθήσουν να φορέσετε και να βγάλετε το ένδυμά σας
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά, χωρίς αιχμηρά νύχια που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ύφασμα, αποφύγετε να βάζετε τα νύχια σας στο ύφασμα όταν τραβάτε το ένδυμα
- Μην τεντώνετε υπερβολικά το υλικό
- Ανοίξτε όλα τα φερμουάρ/κουμπώματα
- Αφαιρέστε προσωρινά τα κοσμήματα από τα χέρια, τους καρπούς και τους αστραγάλους, κατά περίπτωση, ενώ φοράτε και βγάζετε το ρούχο σας. Κοσμήματα, όπως δαχτυλίδια με πέτρες, μπορεί να πιαστούν στο ένδυμά σας

Ενδύματα κάτω άκρων

Ελέγξτε την ετικέτα του ενδύματος Jobskin® Premium για αριστερά ή δεξιά, ξεκινώντας με το ένδυμα ανάποδα, βάλτε το τμήμα του ποδιού προς τα μέσα μέχρι τη φτέρνα και κρατήστε το με τα δύο χέρια, με τη ραφή στρωμένη προς τα κάτω. Τραβήξτε το πάνω από το πόδι σας πέρα από τον αστράγαλο, θα πρέπει τώρα να είναι από τη δεξιά πλευρά προς τα έξω. Προσαρμόστε το ένδυμα έτσι ώστε η φτέρνα να είναι στη θέση της.

Ενδύματα ψηλά στη μέση

Προσαρμόστε το ρούχο σας έτσι ώστε να είναι άνετο στη μέση σας. Αυτό θα το εμποδίσει να γλιστρήσει προς τα κάτω.

Βάλτε τα χέρια σας με την παλάμη προς τα έξω, μέσα στην πλάτη και σηκώστε το μακριά από το δέρμα σας. Αφήστε το να πέσει προς τα πίσω για να εφαρμόσει άνετα πάνω στους γλουτούς.

Μανίκια βραχιόνων

Περάστε το χέρι σας μέσα από ολόκληρο το μανίκι, κρατώντας τη ραφή σε ευθεία γραμμή με το μικρό σας δάχτυλο, και ανεβάστε το μανίκι στο βραχίονα σας. Μπορεί να είναι χρήσιμο να ακουμπήσετε το χέρι σας σε έναν τοίχο. Εάν υπάρχει γάντι, η ραφή θα πρέπει να περνάει από την παλάμη στο χέρι

σας και στη συνέχεια να καμπυλώνει πάνω από τον αγκώνα σας στο μπράτσο σας.

Γάντια

Προσαρμόστε τα δάχτυλα τραβώντας προσεκτικά τις ραφές μέχρι το γάντι να εφαρμόζει άνετα στους χώρους μεταξύ των δαχτύλων. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα έχει εξομαλυνθεί ομοιόμορφα στα δάχτυλα και το χέρι.

Μάσκες προσώπου

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιούνται ενδύματα πίεσης για την αντιμετώπιση των ουλών στο πρόσωπο των παιδιών, συνιστάται να προηγηθεί ορθοδοντικός έλεγχος.

Ανοίξτε το κουμπωμα, κρατήστε το πηγούνι στη θέση του πιέζοντας το πηγούνι στο άνω μέρος του στέρνου ή με το ένα χέρι αν έχετε βοήθεια. Συγκεντρώστε το ύφασμα και τεντώστε το πάνω από το κεφάλι. Προσαρμόστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, η μάσκα προσώπου πρέπει να έχει το ύφασμα κατανεμημένο για να ταιριάζει σωστά. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει γλιστρώντας τα δάχτυλα μέσα από τα ανοίγματα και τοποθετώντας τα στο επιθυμητό σημείο.

Ενδύματα κορμού

Ανοίξτε το κουμπωμα, τοποθετήστε έναν βραχίονα κάθε φορά, ρυθμίστε ώστε να εφαρμόζει άνετα σε κάθε βραχίονα. Τραβήξτε τις δύο πλευρές προς το κέντρο και κλείστε το φερμουάρ. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι λείο και εφαρμόζει άνετα, όταν τοποθετηθεί, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δυσφορία, ιδίως στις καμπύλες των βραχιόνων και στις περιοχές της μασχάλης.

4. Τύποι διαθέσιμων ενδυμάτων Jobskin® Premium

Τα ενδύματα Jobskin® Premium είναι κατά παραγγελία και κατασκευασμένα στα μέτρα του καθενός. Οι τύποι των ενδυμάτων χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ενδύματα προσώπου

- Μάσκα πλήρους προσώπου
- Ανοιχτή μάσκα προσώπου
- Λουράκι για το πηγούνι
- Τροποποιημένος μαντάς πηγουνιού

2. Άνω άκρα/Κορμός

- Γιλέκο με κοντά μανίκια, μακριά μανίκια ή χωρίς μανίκια
- Κορμάκι με κοντά μανίκια, μακριά μανίκια ή χωρίς μανίκια

3. Μανίκια βραχιόνων

- Μανίκι βραχιόνων από τον καρπό έως τη μασχάλη
- Μανίκι βραχιόνων με γάντι
- Μανίκι βραχιόνων με κάλυμμα ώμου
- Μανίκι βραχιόνων με κάλυμμα ώμου και γάντι

4. Χέρια/Γάντια

- Γάντι έως τον καρπό
- Γάντι έως τη μασχάλη

5. Κάτω άκρο/πόδι

- Στυλ Char αριστερά ή δεξιά ή και τα δύο
- Ενδύματα ύψους μέσης με δύο πόδια (ανοικτή ή κλειστή ηβική χώρα)
- Ένδυμα με ένα πόδι στο ύψος της μέσης αριστερά ή δεξιά
- Παντελόνι κάτω και πάνω από το γόνατο
- Κάλτσες στο μήκος μηρού (ανοιχτές ή κλειστές)
- Κάλτσες μέχρι το γόνατο (ανοιχτές ή κλειστές)
- Κάλτσα πάνω ή κάτω από το γόνατο

5. Ενδειξεις

Η αντιμετώπιση και η προφυλακτική θεραπεία προβληματικών ουλών, συμπεριλαμβανομένων των υπερτροφικών και κελοειδών ουλών που προκαλούνται από βλάβες στο δέρμα μετά από εγκαύματα, τραύματα ή μετεγχειρητικές επιπλοκές χειρουργικών ουλών.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέσω διεθνών ερευνών δείχνουν ότι η έγκαιρη εφαρμογή ενδυμάτων θεραπείας πίεσης με το σωστό καθεστώς εφαρμογής συμβάλλει επιτυχώς στον έλεγχο της ανάπτυξης μη φυσιολογικού ουλώδους ιστού σε προβληματικές ουλές.

Επιτυγχάνουν την παραγωγή μιας πιο λείας, μαλακής και εύκαμπτης ουλής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης και τη μείωση των πιθανών συσπάσεων.

Η συνεχής πίεση που παρέχεται από τα ενδύματα πίεσης μπορεί να αποφέρει υψηλό βαθμό μη χειρουργικού ελέγχου του σχηματισμού υπερτροφικών ουλών και των συστώλων των ουλών για την επίτευξη μιας πιο μαλακής, επίπεδης και χλωμής ουλής.

6. Αντενδείξεις

Με ένα κατά παραγγελία ένδυμα που ελέγχεται τακτικά από επαγγελματία υγείας, οι αντενδείξεις είναι πολύ σπάνιες.

- Μη αντισταθμισμένη οργανική ανεπάρκεια (π.χ. καρδιακή, ηπατική ή νεφρική)
- Ανεπεξέργαστη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή φλεβίτιδα
- Σοβαρή αρτηριακή νόσος (ABI 0,49 ή λιγότερο)

7. Υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις

Ο ιατρός σας θα πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις που μπορεί να έχετε, ώστε αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τη συνταγογράφηση του ενδύματός σας Jobskin® Premium. Εάν δεν έχετε ειδοποιήσει τον κλινικό σας για οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες, παρακαλείστε να ΜΗΝ φορέσετε αυτό το ένδυμα έως ότου ο κλινικός σας επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.

8. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες όταν φοράτε αυτό το ένδυμα με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας. Εάν η ιατρική σας κατάσταση επιδεινωθεί ενώ φοράτε αυτό το ένδυμα, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε αμέσως το ιατρό ή τον κλινικό ιατρό σας.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, καταστάσεις ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τον χειρισμό ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του ενδύματος. Αυτό περιλαμβάνει οποιοσδήποτε τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις από τον χρήστη. Το ένδυμά σας πρέπει να συντηρείται τακτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Τα ενδύματα Jobskin® Premium δεν είναι επιβραδυντικά φλόγας, αποφύγετε τις γυμνές φλόγες όταν τα φοράτε.

Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- Αλλεργική αντίδραση
- Αποχρωματισμός ή αλλαγή της θερμοκρασίας του σώματος που δείχνει προβλήματα κυκλοφορίας ή αγγείων
- Διαρκής ερυθρότητα ή δερματικές εκδορές
- Αυξημένη θερμοκρασία

Εάν έχετε ανοιχτές πληγές στην περιοχή που πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία, αυτές πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλο επίδεσμο ή επίθεμα, πριν από την εφαρμογή του ενδύματος συμπίεσης.